

OTROS ACCESORIOS PARA CAMAS

**Sábana antiescaras suapel Sanitized
- 1051xx****SÁBANA ANTIESCARAS
SUAPEL SANITIZED -
1051XX**

Sábana antiescaras en suapel sanitized de Ubiotex con exterior de fibra de poliéster para una sensación de confort. Indicada para pacientes que necesitan una sensación de calor y confort extra, gracias a su tejido en forma de vellones de lana, tanto en silla de ruedas como en sillones o camas.



OTROS ACCESORIOS PARA CAMAS

Sábana antiescaras suapel Sanitized - 1051xx

CARACTERÍSTICAS

- **Composición exterior:** poliéster, terlenka.
- **Color y dimensiones:**
 - Blanco
 - Sábana de suapel sanitized
 - 40x60 (105100)
 - 50x70 (105101)
 - 60x80 (105102)
 - 70x80 (105103)
 - 60x90 (105104)
 - 70x90 (105105)
 - 80x90 (105106)
 - 90x150 (105107)
 - 110x170 (105108)
 - 70x190 (105109)
 - 80x190 (105110)
 - 90x190 (105111)
 - 105x190 (105113)
 - 120x190 (105114)
 - 135x190 (105115)
 - 90x160 (105117)
 - Sábana de suapel sanitized ajustable
 - 90x190x20 (105125)
- **Tratamiento del material y conservación**
 - El tratamiento de la funda sanitized se aplica sobre la superficie del tejido para crear una barrera antiácaros, antibacterias y antihongos muy eficaz.
 - Un plus de protección para los complementos de descanso.
 - Las sábanas de suapel deben ser almacenadas preferentemente en posición plana y protegidas de la luz natural y de la humedad.
- **Consejos**
 - La primera prevención de la escara en posición sentada o tumbada, consiste en cambiar los puntos de apoyo del cuerpo sobre la zona donde éste reposa.
 - Por término medio esto debe realizarse cada tres horas, a fin de reducir una presión demasiado prolongada en las áreas de prominencias óseas y permitir el acceso de la sangre a los tejidos.
 - Se debe comprobar que la sábana se adapta al asiento o cama donde va a ser utilizada.
- **Instalación y precauciones**
 - La forma de las sábanas de suapel está pensada para adaptarse a las diferentes tipos de asientos y camas que puedan usar los pacientes y necesidades de los mismos.
 - Están prohibidos los productos cáusticos, decapantes, disolventes y objetos punzantes/cortantes en contacto directo con el producto.
 - Evitar el contacto prolongado de líquidos y humedades con la sábana de suapel.
 - Examinar regularmente el desgaste normal de la sábana (modificación del aspecto de la superficie, etc.).

OTROS ACCESORIOS PARA CAMAS

**Sábana antiescaras suapel Sanitized
- 1051xx**