

ARNESES PARA GRÚAS

Arnés dorsolumbar para grúa de transferencia Standard

ARNÉS DORSOLUMBAR PARA GRÚA DE TRANSFERENCIA STANDARD



El arnés dorsolumbar standard para grúa de transferencia de **Tecnimoe**m ha sido diseñado para realizar las transferencias con seguridad y comodidad tanto para el paciente como para el personal asistencial.

- Puede usarse sentado y acostado, con las piernas juntas o separadas, dependiendo del grado de movilidad del paciente.
- El arnés es adecuado para personas con movilidad de la cabeza.
- Confeccionado con tratamiento Thermo-tex superabsorbente que anula eficazmente la reproducción de bacterias y la formación de olores.
- Transpirable, ultraligero, de secado rápido y alta resistencia a la tracción.


ARNESES PARA GRÚAS

Arnés dorsolumbar para grúa de transferencia Standard

CARACTERÍSTICAS

- Poliéster 100%.
- Regulación en tres alturas (rojo, verde y amarillo) con anclaje de seguridad.
- Compuesto de diferentes capas de espesor y materiales:
 - 0.5 mm tejido CANTÁBRICO (100% poliéster texturizado de color oscuro en contacto con el paciente)
 - 4.5 mm de tejido esponja BED (100% poliéster en interior)
 - 0.75 mm de tejido ONDURA LÁSER (67% de poliamida, 32% de poliéster y 1% de poliuretano en capa externa del arnés)
 - Cintas de poliéster de ancho 4 cm (azul, rojo, verde y amarillo) y ribete de acrílico de 3 cm (azul).
- **Seguridad:**
 - No utilizar nunca con cargas superiores a la carga máxima de la grúa (marcada sobre la misma) o del arnés (200kg.).
 - Compruebe que el arnés se encuentra en perfectas condiciones antes de utilizarlo con pacientes.
 - Se recomienda usarlo previamente en personas sanas para familiarizarse con él.
 - No utilizar el arnés si presenta signos de rasgado, desgaste o deformación.
 - No usar el anclaje final de seguridad de color azul.
- **Lavado y secado:**
 - Lavado recomendado a 30º con jabón neutro.
 - No usar lejía ni lavar en seco.
 - No admite planchado.
 - Secado sobre superficie plana.
 - No exponer al sol o fuente de calor.
 - No admite secadora.

Medidas aproximadas (en mm.). Disponible en 2 tallas, M y L

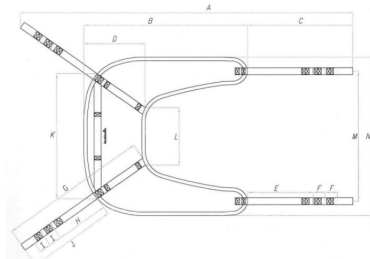

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Talla M	180	93	60	35	37	7	85	28	7	51	71	32	74	90
Talla L	199	104	60	39	37	7	89	28	7	51	79	36	83	100

ARNESES PARA GRÚAS

Arnés dorsolumbar para grúa de transferencia Standard

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Peso máximo soportado:** 200 kg