

## TERAPIA DE MANO

## Caja expositora de pelotas de rehabilitación y antiestrés EV300

### CAJA EXPOSITORA DE PELOTAS DE REHABILITACIÓN Y ANTIESTRÉS EV300



La caja expositora se compone de 24 unidades de pelotas de rehabilitación y antiestrés de diferentes tamaños y densidades.

- Estas pelotas poseen diferentes aplicaciones terapéuticas:
  - Ayudan a disminuir los niveles de estrés.
  - Contribuyen al aumento de la fuerza en las manos y los dedos durante las sesiones de rehabilitación.
  - Mejoran la circulación sanguínea.
- Existen 3 modelos diferentes de estas pelotas, con diferentes tamaños y densidades para satisfacer distintas necesidades:
  - Nivel **blando**: amarillo.
  - Nivel **moderado**: rojo.
  - Nivel **difícil**: verde.
- Los 3 modelos de pelotas están fabricados en **PU**, un material que aporta los siguientes beneficios de uso:
  - Es **resistente**, lo que garantiza una dilatada vida útil.
  - Es **ligero**, lo que facilita su uso y transporte.

## TERAPIA DE MANO

# Caja expositora de pelotas de rehabilitación y antiestrés EV300

## CARACTERÍSTICAS

### • Instrucciones:

- 1- Agarrar la pelota y ejercer fuerza hacia la muñeca
- 2- Sujetar la pelota con los dedos sobre una superficie lisa y ejercer fuerza presionando la pelota sobre la superficie
- 3- Pellizcar la pelota con los dedos como si se tratara de una pinza
- 4- Extender el pulgar sobre la pelota y ejercer fuerza hacia la muñeca con los dedos
- 5- Hacer fuerza con los dedos alternos
- 6- Ejercer fuerza con la palma de la mano sobre una superficie lisa



## TERAPIA DE MANO

# Caja expositora de pelotas de rehabilitación y antiestrés EV300

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Estructura:** Poliuretano